

Hallufix®

INNOVATIVE ORTHOTIC SOLUTIONS

deutsch

Mittelfußbandage mit Pelotte

Optimaler Halt
durch Umlenk-
mechanismus!



Produktinformation bitte vor Gebrauch lesen!

Hallufix[®]

INNOVATIVE ORTHOTIC SOLUTIONS

Die Mittelfußbandage von Hallufix[®] hilft

- beim Sport
- bei langem Stehen
- oder immer, wenn Ihr Fuß stark belastet wird


Wirkungsweise

- optimaler Halt durch einzigartiges Befestigungssystem
- stabilisiert und entlastet die Mittelfußknochen
- Pelotte richtet das Quergewölbe auf und entlastet den Fußballen
- lindert Fußbeschwerden bei Spreizfuß und Hallux Valgus
- die Fußbeweglichkeit bleibt erhalten

Das Set besteht aus:


- 1 Umlenkungsschiene
- 2 Mittelfußbandage
- 3 Seitenkissen
- 4 Pelotte

Einheitsgröße, links und rechts tragbar.

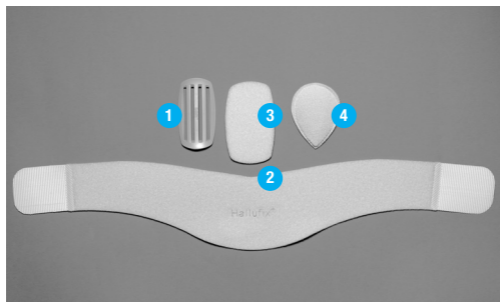

Einfädeln der Mittelfußbandage in die Schiene

Legen Sie die Schiene (1) und die Mittelfußbandage (2) wie in Abb. I gezeigt, vor sich hin. Die Mittelfußbandage wird von oben durch den Umlenkungsschlitz (R1) gezogen, dann von unten durch den Umlenkungsschlitz (R2) geführt → (Abb. II) und an der Mittelfußschiene (2) befestigt → (Abb. III).

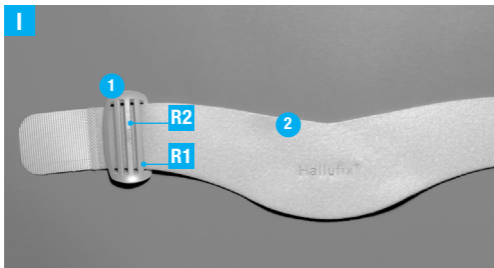




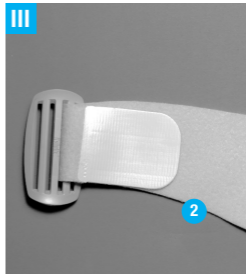


Abb. IV: Das zweite Ende der Mittelfußbandage (2) wird von oben durch den Umlenkungsschlitz (L1) durchgezogen, durch den Schlitz (L2) zurückgeführt und dann an (2) befestigt.

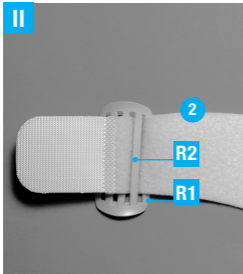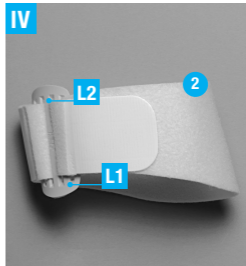

Seitenkissen

Das Seitenkissen (Abb. V) ist ab Werk in der Originalverpackung durch ein Klettband fest auf die Schiene aufgebracht.

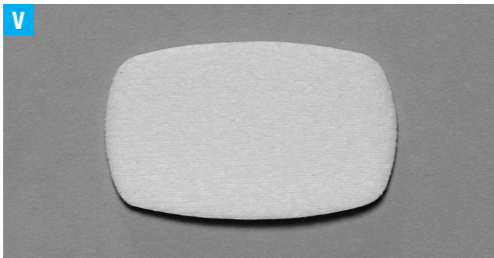

Anlegen der Schiene

Nachdem die Mittelfußbandage eingefädelt ist kann die Schiene angelegt (Abb. VI) und am Fuß befestigt werden (Abb. VII).



Einlegen der Pelotte

Die Pelotte wird an der Unterseite des Fußes zur Anhebung der Mittelfußknochen mit der Klettseite zur Bandage eingelegt und passend im Fußgewölbe befestigt. Sie übernimmt eine wichtige Funktion beim Gehen und sollte daher nur weggelassen werden, wenn Schuhe mit Fußbett oder Einlagen getragen werden.



Die Pelotte (A) sollte beim Tragen nicht über die Ballenlinie (B) hinausreichen und beim Gehen als angenehm empfunden werden (Abb. VIII).

Nebenwirkungen

Bei ordnungsgemäßen Gebrauch sind keine Nebenwirkungen bekannt. Sollten lokale Druckerscheinungen oder Durchblutungsstörungen auftreten, bitte den korrekten Sitz der Bandage überprüfen, diese lockern oder gegebenenfalls ablegen.

Gegenanzeigen

Überempfindlichkeiten und/oder allergische Reaktionen sind bei sachgemäßem Gebrauch nicht bekannt.

Bei nachfolgenden Krankheitsbildern ist das Anlegen und Tragen der Schiene nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angezeigt: Hauterkrankungen und -verletzungen im versorgten Körperabschnitt, insbesondere bei entzündlichen Erscheinungen, ebenso bei aufgeworfenen Narben mit Anschwellung, Rötungen und Überwärmung, Gichtanfall, Rheuma, Drucküberempfindlichkeit, Grundgelenksarthritis, Polyneuropathie (Durchblutungs- und Empfindungsstörungen bei z.B. Diabetes), Lymphabflussstörungen – dazu gehören auch unklare Weichteilschwellungen, die an anderen Körperteilen fern des angelegten Hilfsmittels auftreten.

Wichtige Hinweise

- Bei unsachgemäßer Anwendung ist eine Produkthaftung ausgeschlossen.
- Gewährleistung wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gewährt.
- Das Produkt darf nicht verändert werden und es dürfen nur **Hallufix®** Originalteile verwendet werden, um die vollständige Funktionalität zu gewährleisten sowie die Produkthaftung aufrecht zu erhalten.
- Bandage und Seitenkissen sind Verschleißmaterialien und haben je nach Tragehäufigkeit und bei ordnungsgemäßer Verwendung und Pflege eine durchschnittliche Lebensdauer von max. 3 Monaten.

Pflege



Handwäsche in milder Seifenlauge
lauwarm, ohne Weichspüler



Keine Chlorbleichung



Nicht bügeln



Keine chemische Reinigung




Nicht in den Wäschetrockner

- Stets trocken lagern
- Nicht mit säurehaltigen Mitteln in Berührung kommen lassen
- In Einzelteilen oder komplett mit einem milden, alkalifreien Mittel bei 30° durch Handwäsche reinigen
- Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen, um die Funktionsfähigkeit lange zu erhalten und Beschädigungen zu vermeiden
- beim Trocknen nicht direkter Hitze aussetzen (offenes Feuer, Heizung, Sonneneinstrahlung)

Hallufix®

INNOVATIVE ORTHOTIC SOLUTIONS

Das Produkt wurde im Rahmen unseres Qualitätsmanagements geprüft. Sollten Sie trotzdem eine Beanstandung haben, setzen Sie sich bitte mit dem Fachhändler vor Ort in Verbindung.

 Hallufix® ist ein eingetragenes Warenzeichen.
Zum Schutzrecht angemeldet.

Zeichenerklärung



Gebrauchsanweisung beachten



CE-Kennzeichnung



Hersteller



Herstelldatum



Chargenbezeichnung

Hallufix AG

Tulbeckstr. 32 · D-80339 München

Tel.: +49 (89) 96 05 779-0

Fax: +49 (89) 96 05 779-99

www.hallufix.com

info@hallufix.de